

Vor dem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen!

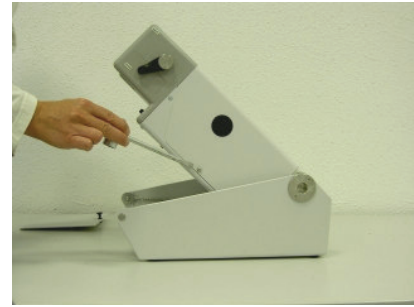


Abb.1

Abb.2

Diafachdeckel durch Ziehen des schwarzen Zugknopfes anheben und entfernen (Abb.1). Stellen Sie das Gehäuseoberteil senkrecht auf und lösen an beiden Seiten je 1 Schraube, durch die das Gehäuseoberteil befestigt ist (Abb.2).



Abb.3

Abb.4

Drücken Sie das Gehäuseoberteil wieder runter in eine waagerechte Lage. Heben Sie das Gehäuseoberteil hinten leicht hoch (Abb.3). Greifen Sie mit der linken Hand nach vorne in das Diafach (Abb.4). Halten Sie mit der rechten Hand das Gehäuseoberteil vorne mittig fest und ziehen Sie nun mit starkem Kraftaufwand den Gehäusedeckel nach oben aus seiner Schnapphalterung.

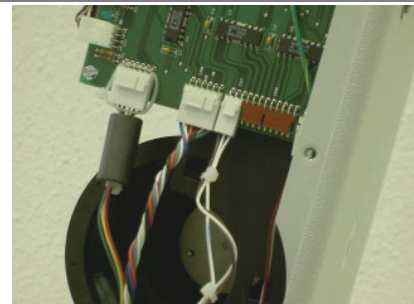
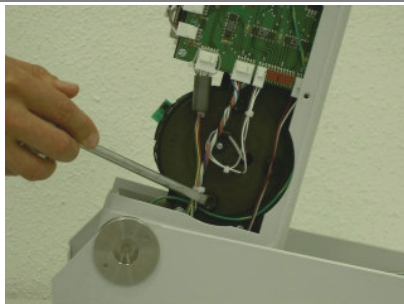


Abb.5

Abb.6

Nach Entfernen des Gehäusedeckels stellen Sie das Gehäuseoberteil wieder senkrecht. Hier erkennen Sie eine runde Scheibe mit 3 gleichen Befestigungselementen mit Kreuzschlitz (Abb.5). Drehen Sie jedes Befestigungselement um eine viertel Drehung nach links. Lösen Sie die 3 Steckverbindungen (Abb.6) und ziehen die Lampenhalterung aus der Diatrommel heraus (Abb.7).

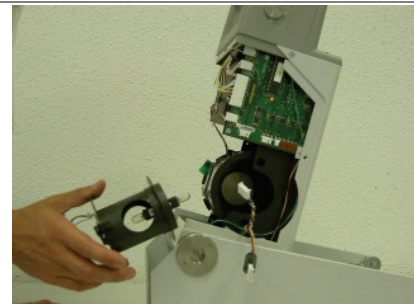
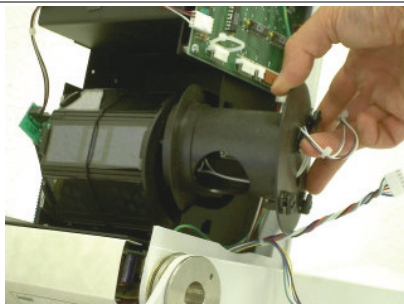


Abb.7

Abb.8

Ziehen Sie nun die defekten Glühbirnen heraus und stecken eine neue ein (Abb.8). Fassen Sie die Glühbirne nicht mit den Fingern an, sondern verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch. Der Zusammenbau erfolgt nunmehr in umgekehrter Richtung.